



PROGREEN

**Инновационное
Дезинфицирующее
средство с моющим
Эффектом «ПРОГРИН ДЕЗ-8»
в монодозах по 1 мл.**



Описание

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПРОГРИН ДЕЗ-8» в монодозах по 1 мл.

«PROGREEN INTERNATIONAL, LLC» производитель инновационного высококонцентрированного, одноступенчатого дезинфицирующего средства с моющим эффектом «ПРОГРИН ДЕЗ-8», содержащее в своем составе 80% ЧАС (ЧАС-четвертичноаммониевые соединения), не имеющего аналогов в мире.

Благодаря такой упаковке, достигается максимальная оптимизация расходов на транспортировку, хранение, утилизацию, а также уменьшается количество отходов от пластиковой тары. Такая упаковка позволяет более точно вести учет, а так же упрощается контроль над расходом средства. Назначение препарата - дезинфекция, обработка, очистка, мойка для любых поверхностей.

80% – самая высокая концентрация на рынке.

ПРОГРИН ДЕЗ-8 эффективно уничтожает все известные бактерии, грибки и вирусы.



Приготовление рабочих растворов из 1 мл.

- для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, мебели, напольных покрытий, уборочного инвентаря, санитарно-технического оборудования – на 10 л. воды;
- для дезинфекции куветов и приспособлений к ним, барокамер, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования - на 10 л. воды;
- для дезинфекции медицинских отходов – на 6,67 л. воды;
- для дезинфекции стоматологических материалов и установок – на 4 л. воды;
- для дезинфекции медицинского оборудования – на 5 л. воды;
- для дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов - на 10 л. воды;
- для проведения генеральной уборки в лечебных, детских и оздоровительных учреждениях - на 10 л. воды;
- для борьбы с плесенью – на 4 л. воды;
- для дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству лекарственных средств - на 10 л. воды;
- для дезинфекции помещений, оборудования на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах, гостиницах, местах массового скопления людей, инструментов, спецодежды, парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов и других объектов в сфере обслуживания населения - на 10 л. воды;
- для обеззараживания крови и биологических выделений – на 1 л. воды.

Состав и свойства

Жидкость светло-желтого цвета .

Срок годности средства 5 лет.

Срок годности рабочих растворов 28 суток

Выпускается в концентрированном виде, объемом 1 мл.



Четвертично-аммониевое соединение
дидецилдиметиламмония хлорида 48 %

Четвертично-аммониевое соединение
Алкилдиметилбензиламмония хлорида 32%

Функциональные добавки

Особые свойства

- Не вызывает коррозии изделий изготовленных из различных материалов;
- Не содержит хлора;
- Сохраняет все свойства при замораживании/размораживании;
- Не фиксирует органические загрязнения;
- Великолепные моющие свойства;
- Исключительные дезинфицирующие свойства;
- Эксклюзивно малое время экспозиции;

Эффективность

	Сравнительная таблица дез. средств (*экспозиция)	Концентрат ПРОГРИН ДЕЗ-8	Хлорамин (активность 25%)	Гипохлорит натрия (активность 12%)
1	Можно приготовить из:	1 л.	1 кг.	1 л.
1.1.	Для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования	10 000 литров (0,01% раствор - 15* мин.)	200 литров (0,5% раствор - 120* мин.)	23,9 литра (0,5% по активному хлору - 120* мин.)
	Сравнение с площадью:	100 000 м2	2 000 м2	239 м2
1.2.	Для дезинфекции изделий медицинского назначения	6 666 литров (0,015% раствор - 15* мин.)	100 литров (1 % раствор - 120* мин.)	11,9 литров (1% по активному хлору - 120* мин.)
	Сравнение со сроком годности:	28 суток	1 сутки	1 сутки
1.3.	Для обеззараживания уборочного материала, медицинских отходов классов Б и В	4 000 литров (0,025% раствор - 15* мин.)	33,3 литра (3% раствор - 120* мин.)	6,25 литров (3% по активному хлору - 120* мин.)

Эффективность

Бактерии

- Анаэробные инфекции,
- Возбудители ВБИ,
- Грамотрицательные бактерии,
- Грамположительные бактерии
- Микобактерия туберкулеза ;

Вирусы

- Аденовирусы,
- Атипичной пневмонии,
- ВИЧ,
- Герпеса,
- Грипп,
- Парагрипп,
- Парентеральных гепатитов,
- Полиомиелит,
- Прочие возбудители ОРВИ,
- Птичьего гриппа (H5N1),
- Ротавирусы,
- Свиной грипп (H1N1),
- Энтеральных гепатитов,
- Энтеровирусы,
- Туберкулеза;

Патогенные грибы

- Дерматофитон,
- Кандида,
- Плесневые грибы



Сфера применения

1

Больницы и медицинские учреждения: акушерские стационары, ЛПУ, клинические лаборатории, станции переливания крови, бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, санитарный транспорт и т.п.

2

Детские учреждения: детские сады, школы, летние лагеря и т.п.,

3

Пищевая отрасль: предприятия общественного питания, предприятия продовольственной торговли, потребительские рынки и т.п.,

4

Коммунальные объекты: бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, парикмахерские, косметические и (или) массажные салоны, прачечные и т.п.,

5

Предприятия фармацевтической промышленности

6

Места общественного скопления людей: торговые центры, санатории, турбазы, военные части, аэропорты, вокзалы и т.п.,

7

Прочие источники повышенной инфекционной опасности: инфекционные очаги, пенитенциарные учреждения и т.п.,

Объекты обработки

ПРОГРИН ДЕЗ-8 используют :

Для дезинфекции и профилактики штаммов возбудителей атипичной пневмонии: Коронавирусов А(Н5N1) и А(Н7N9)- «птичий грипп», А(Н1N1) и А(Н1N2)- «свиной грипп» и (COVID-19) SARS-CoV-2. В больницах и медицинских учреждениях препарат обеспечивает надежную защиту от смертельных вирусов и бактерий. С помощью ПРОГРИН ДЕЗ-8 проводят дезинфекцию барокамер, наркозно-дыхательного оборудования, аппаратуры для анестезии, а также различных комплектующих к ним. ПРОГРИН ДЕЗ-8 применяют для дезинфекции медицинского оборудования, в том числе для чистки и дезинфекции стоматологических инструментов и аппаратуры. С помощью распыления, дезинфицируют воздух в помещениях. ПРОГРИН ДЕЗ-8 обеспечивает дезинфекцию не только помещений, палат, инструментов, посуды, но и спецодежды. Кроме обработки и очищения, средство ПРОГРИН ДЕЗ-8 используется для обеззараживания крови и таких выделений, как: моча, рвотные и фекальные массы.

Краткий перечень объектов обработки согласно инструкции:

Анестезиологическое оборудование, Баки накопительные автономных туалетов, Белье нательное, Белье постельное, Бытовые кондиционеры, Вентиляционные фильтры, Воздух в помещениях, Воздуховоды, Вращающиеся стоматологические инструменты, Выделения больного (моча, фекалии, мокрота), Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты к эндоскопам, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Кровь, Кувезы, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), Мокрота, Моча, Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, Мягкая мебель, Напольные покрытия, Наркозно-дыхательная аппаратура, Обивочные ткани, Обувь из пластика, резины, Одноразовая посуда, Пищевые отходы, Плевательницы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Приспособления к кюветам, Рвотные массы, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Слюноотсосы, Сплит-системы, мультизональные сплитсистемы, Спортивный инвентарь, Столовая посуда, Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), Стоматологические отсасывающие системы, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь, Фекалии

Объекты обработки



С помощью препарата ПРОГРИН ДЕЗ-8 производят капитальную уборку и дезинфекцию в детских садах, санаториях, профилакториях, школах, лагерях, других лечебных и оздоровительных учреждениях. Средством обрабатывают любые поверхности: школьную мебель, парты, стулья, полы и стены.

Препарат также способствует удалению плесени и профилактики от нее. При дезинфекции воздуха, систем вентиляции и кондиционирования препарат ПРОГРИН ДЕЗ-8 распыляют для достижения наилучшего результата.

ПРОГРИН ДЕЗ-8 является сверхэффективным и простым в использовании противотуберкулезным средством.

Продукт отвечает принятому стандарту по патогенности. Доказано, что ПРОГРИН ДЕЗ-8 эффективно уничтожает инфекционный вирус гепатита В (HBV).

Применение ПРОГРИН ДЕЗ-8 в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях, обеспечит дополнительную профилактику вирусных заболеваний в период эпидемиологического пика.

Объекты обработки

Бассейн, баня и сауна – *общественные места*, нуждающиеся в особом уходе.

При посещении таких мест, важно быть уверенным в их полной гигиенической чистоте. Это зона повышенной опасности, где могут обитать паразиты, вирусы и опасные бактерии. Средства для дезинфекции, в обязательном порядке, должны использоваться в подобных учреждениях.

ПРОГРИН ДЕЗ-8, обеспечит полную дезинфекцию бассейнов, бань и саун, включая в себя не только обработку кафеля, труб и других твердых поверхностей, но и обеззараживание воды.





Конкурентные преимущества

Высококонтцентрированное, одноступенчатое дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПРОГРИН ДЕЗ-8» в монодозах работает во всех режимах дезинфекции. Время экспозиции ПРОГРИН ДЕЗ-8 максимально мало, при определенных режимах работает на контакте, что позволяет значительно сократить время обработки.

Такая упаковка во много раз сокращает расходы на транспортировку и хранение. В одной упаковке, 5 x 1 мл. концентрата - это 50 литров рабочего раствора. Доставку можно осуществить в любой район и любым доступным способом. Разгрузка под силу обычному человеку, а для хранения подойдет минимально возможное место.

ПРОГРИН ДЕЗ-8 обладает высочайшим моющим эффектом, позволяет мыть и дезинфицировать различные поверхности одним средством. Срок годности концентрата составляет пять лет, срок годности рабочего раствора 28 суток. Средство можно замораживать, после оттаивания оно полностью сохраняет свои свойства.

ПРОГРИН ДЕЗ-8


максимальный результат, за минимальное время.

Рекомендации

Высочайшая эффективность дезинфицирующего средства ПРОГРИН ДЕЗ-8 подтверждена многочисленными исследованиями. Препарат прекрасно зарекомендовал себя в реальных условиях и получил лучшие отзывы специалистов.



Рекомендации

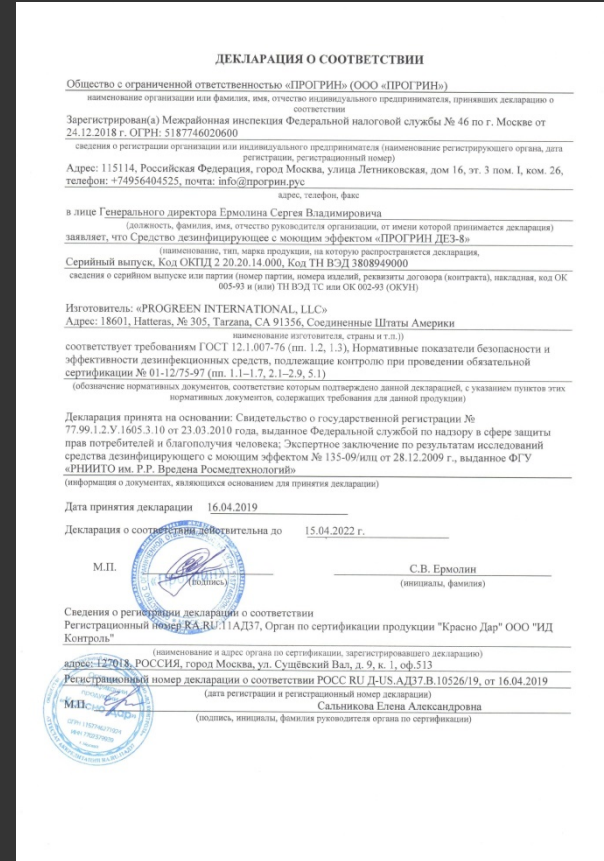

Инновационное сверх концентрированное дезинфицирующее средство ПРОГРИН ДЕЗ-8 имеет все соответствующие сертификаты и разрешения.

Размеры : (100 x 60 x 17) мм,
С ухом : (127 x 60 x 17) мм.
Вес : 10 гр.

